

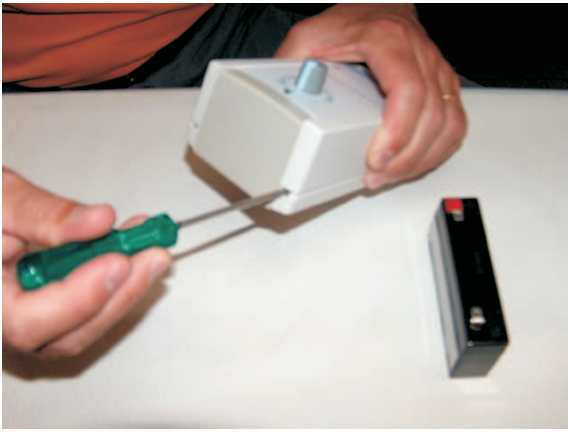


ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DELLO JONOMED


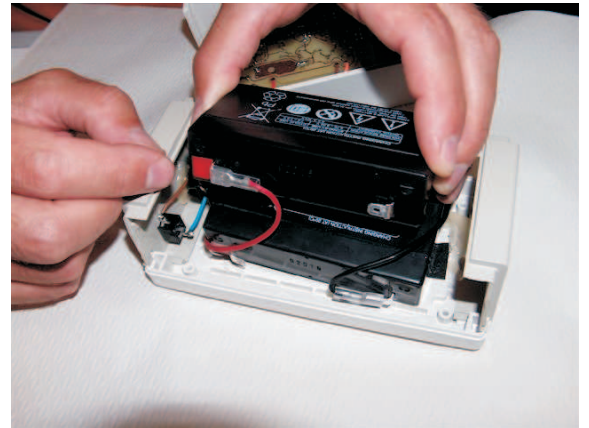


Premere con un cacciavite sulle 4 linguette di plastica come nelle due figure sopra riportate

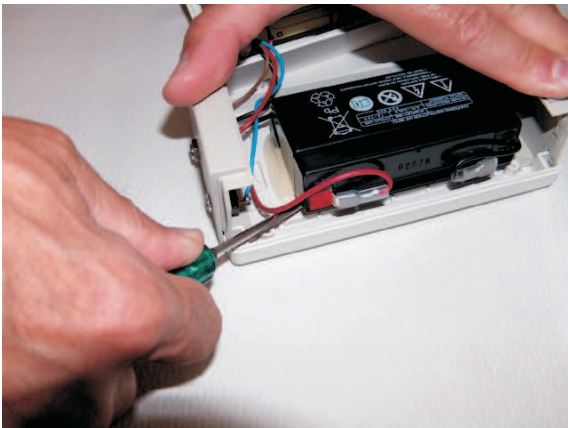


Fare leva con un cacciavite sotto la batteria per scollarla dal fondo di plastica

Appoggiare la nuova batteria sulla vecchia e trasferire i fili rispettando la posizione.

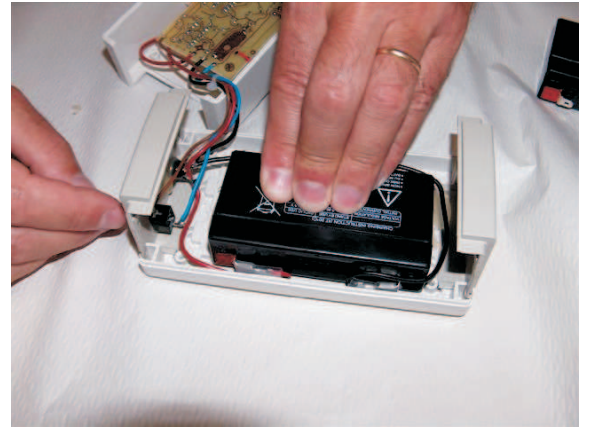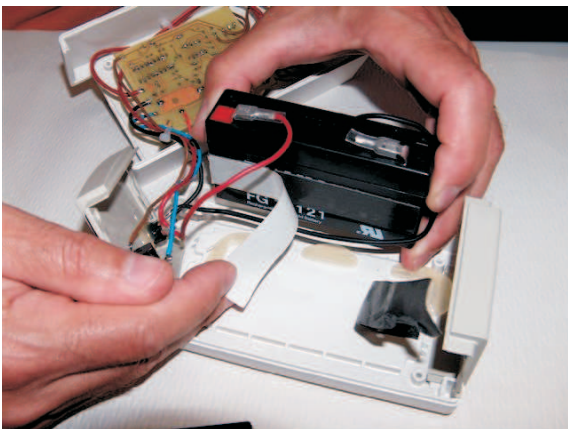

Rimuovere la vecchia batteria, eliminare il vecchio biadesivo e togliere la protezione da quello nuovo

Incollare la nuova batteria su fondo in mezzo alle guide di colla solidificata

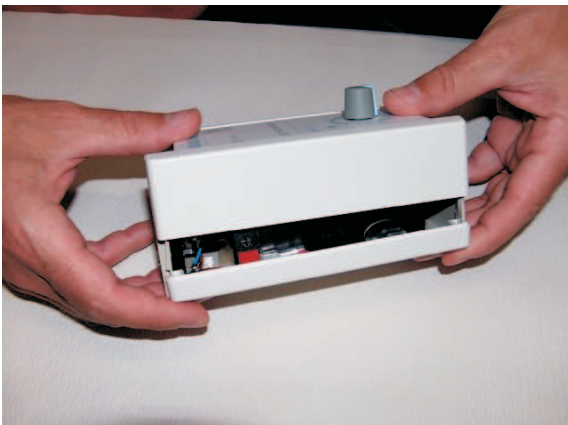

Reinserire il coperchio rispettando le guide ed assicurandosi che non ci siano fili pinzati

Con una leggera pressione chiudere lo strumento (Un clack conferma la chiusura). Non forzare, se l'involucro non si chiude bene, riaprire e controllare eventuali fili pinzati